

MED-COVER SHAMPOO CAP

Touca com shampoo e condicionador

Referência: 810.820.075



Med-Cover Shampoo Cap, é uma touca para higiene dos cabelos e da região da cabeça, que possui em sua composição shampoo e condicionador, promovendo uma higiene completa sem a necessidade de enxágue. Sua formulação foi dermatologicamente testada e é hipoalergênica. Remove gel de Eletroencefalograma(EEG), sangue, iodo, entre outros resíduos. Pode ser aquecida para proporcionar maior conforto ao paciente.

Informações do Produto

Camada	Material
Interna	30% Viscose + 70% Polietileno
Externa	30% Viscose + 70% Polietileno


Tamanho	Peso Unitário	pH
50cm de diâmetro	0,130 gramas	5.5

Composição



Aqua, Parfum, Panthenol, Glycerin, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Extract, Chamomilla Recutita Extract, Chlorhexidine Digluconate, Dimethicone, Polysorbate 20, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Lauryl Glucoside, Citric Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Instruções de Uso

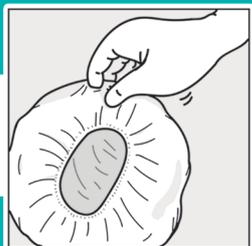


Abra o pacote e retire a touca.



Aplique a touca no couro cabeludo do paciente e massageie suavemente durante 5 minutos.



Retire a touca e descarte o produto de acordo com os regulamentos de descarte de produtos médicos.

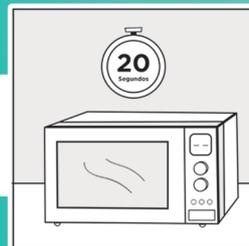

Caso a embalagem esteja fria, a mesma pode ser aquecida em forno micro-ondas por até 20 segundos.



Havendo excesso de cabelo, pode ser necessário o uso de mais de uma unidade do produto para atingir uma lavagem completa, conforme a avaliação do profissional.

Advertências e Precauções

- Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada;
- O produto tem como finalidade higienização do cabelo e couro cabeludo apenas;
- Produto sem enxágue;
- Não aplicar nas pálpebras, nos cantos externos do nariz e da boca e na pele irritada ou lesionada;
- Evitar exposição solar durante o uso do produto;
- Nas primeiras aplicações poderão ser observadas sensações transitórias de ardor, pinicação ou ressecamento da pele. Persistindo o incômodo, suspenda o uso do produto e procure orientação médica;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Não ingerir;
- Em caso de contato acidental com os olhos, lavar com água em abundância. Havendo irritação, suspenda o uso e procure por orientação médica;
- Proibido reutilizar;
- Em pacientes lactantes ou gestantes este produto deve ser utilizado sob autorização e supervisão médica;
- Não é necessário utilizar outros produtos de higienização antes ou após a utilização do Med Cover Shampoo Cap;
- Produto livre de látex;
- Armazenar em local seco e limpo.

Instruções para Uso no Micro-ondas:

1. Coloque o produto no forno micro-ondas;
2. Mantenha por no máximo 20 segundos a 700W;
3. Verifique a temperatura do produto;
4. Não use em temperaturas maiores que 35-40°C.

Armazenamento

Armazenar o produto em local fresco e seco, longe de luz solar direta.