

# MED-COVER SHAMPOO CAP

Touca com shampoo e condicionador

Referência: 810.820.075



**Med-Cover Shampoo Cap**, é uma touca para higiene dos cabelos e da região da cabeça, que possui em sua composição shampoo e condicionador, promovendo uma higiene completa sem a necessidade de enxágue. Sua formulação foi dermatologicamente testada e é hipoalergênica. Remove gel de Eletroencefalograma(EEG), sangue, iodo, entre outros resíduos. Pode ser aquecida para proporcionar maior conforto ao paciente.

## Informações do Produto

Camada	Material
Interna	30% Viscose + 70% Polietileno
Externa	30% Viscose + 70% Polietileno


Tamanho	Peso Unitário	pH
50cm de diâmetro	0,130 gramas	5.5

### Composição



Aqua, Parfum, Panthenol, Glycerin, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Extract, Chamomilla Recutita Extract, Chlorhexidine Digluconate, Dimethicone, Polysorbate 20, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Lauryl Glucoside, Citric Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

## Instruções de Uso

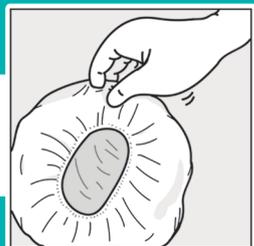


Abra o pacote e retire a touca.



Aplique a touca no couro cabeludo do paciente e massageie suavemente durante 5 minutos.



Retire a touca e descarte o produto de acordo com os regulamentos de descarte de produtos médicos.

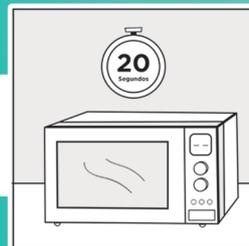

Caso a embalagem esteja fria, a mesma pode ser aquecida em forno micro-ondas por até 20 segundos.



Havendo excesso de cabelo, pode ser necessário o uso de mais de uma unidade do produto para atingir uma lavagem completa, conforme a avaliação do profissional.

## Advertências e Precauções

- Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada;
- O produto tem como finalidade higienização do cabelo e couro cabeludo apenas;
- Produto sem enxágue;
- Não aplicar nas pálpebras, nos cantos externos do nariz e da boca e na pele irritada ou lesionada;
- Evitar exposição solar durante o uso do produto;
- Nas primeiras aplicações poderão ser observadas sensações transitórias de ardor, pinicação ou ressecamento da pele. Persistindo o incômodo, suspenda o uso do produto e procure orientação médica;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Não ingerir;
- Em caso de contato acidental com os olhos, lavar com água em abundância. Havendo irritação, suspenda o uso e procure por orientação médica;
- Proibido reutilizar;
- Em pacientes lactantes ou gestantes este produto deve ser utilizado sob autorização e supervisão médica;
- Não é necessário utilizar outros produtos de higienização antes ou após a utilização do Med Cover Shampoo Cap;
- Produto livre de látex;
- Armazenar em local seco e limpo.

## Instruções para Uso no Micro-ondas:

1. Coloque o produto no forno micro-ondas;
2. Mantenha por no máximo 20 segundos a 700W;
3. Verifique a temperatura do produto;
4. Não use em temperaturas maiores que 35-40°C.

## Armazenamento

Armazenar o produto em local fresco e seco, longe de luz solar direta.