

# MED-COVER LEMON GLYCERIN SWAB STICKS

Swab bucal

Referência: 810.820.077



**Med-Cover Lemon Glycerin Swab Sticks** são swabs que têm como finalidade a higiene bucal de pacientes em cuidados intensivos.

## Informações do Produto

Camada	Material
Anterior e Posterior	Haste de polipropileno com 100% de algodão na extremidade


Tamanho	Peso Unitário	Embalagem
15cm de diâmetro	0,012 gramas	3 Unidades por Embalagem

### Composição




Aqua, Glycerin, Chlorhexidine Digluconate, Polysorbate 80, Citric Acid, Lemon Aroma, Sodium Benzoate.

## Instruções de Uso

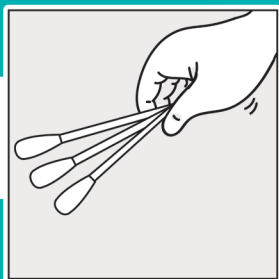

Abra o pacote e retire os swabs.

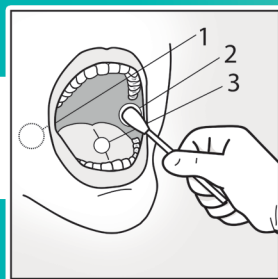

Use um swab para o lado direito da boca, um swab para o lado esquerdo da boca e o terceiro swab limpe a língua do paciente.



Descarte o produto de acordo com os regulamentos de descarte de produtos médicos.

## Advertências e Precauções

- Produto descartável destinado a higiene bucal de pacientes acamados;
- Não reutilizar;
- Não use o produto com embalagens danificadas;
- Produto sem enxágue;
- Não aplicar nas pálpebras, nos cantos externos do nariz e da boca e sobre mucosas com lesões, irritada e/ou com feridas;
- Não ingerir;
- Em caso de contato acidental com os olhos, lavar com água em abundância;
- Descartar após o uso;
- Não inserir no canal do ouvido devido ao risco de perfuração do tímpano;
- Produto destinado ao USO PROFISSIONAL. Crianças não devem usar este produto;
- Não inserir o produto nas narinas;
- Não é necessário utilizar outros produtos de higienização antes ou após a utilização do Med Cover Lemon Glycerin Swabs Sticks;
- Produto livre de látex;
- Armazenar em local seco e limpo.

## Armazenamento e Prazo de validade

Armazenar o produto em local fresco e seco, longe de luz solar direta.