MED-COVER BARRIER CREAM CLOTHS



Lenços para banho com barreira protetora

Referência: 810.820.076

Med-Cover Barrier Cream Cloths é uma solução completa para banho no leito, sem necessidade de enxágue e com barreira protetora para a pele. Possui em sua composição dimeticona 3%, vitamina E e provitamina B5 que proporcionam uma pele hidratada e nutrida. Sua formulação é dermatologicamente testada. Pode ser aquecido, para proporcionar maior conforto ao paciente. Descartável e de uso único.

Informações do Produto

Camada	Material
Anterior e Posterior	60 GSM 50% Viscose + 50% Polietileno

Tamanho	Peso Unitário	Embalagem
22cm x 22cm	0,130 gramas	Com 12 Unidades de Lenços

Composição



Aqua, Parfum, Panthenol, Glycerin, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Extract, Chamomilla Recutita Extract, Chlorhexidine Digluconate, Dimethicone, Polysorbate 20, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Lauryl Glucoside, Citric Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

MED-COVER BARRIER CREAM CLOTHS

Lenços para banho com barreira protetora



Instruções de Uso



Abra o pacote e retire a quantidade de lenços necessárias para o banho de leito.



Aplique suavemente na área selecionada do corpo do paciente. Usar 1 lenço separadamente para cada região do corpo.



Descarte o produto de acordo com os regulamentos de descarte de produtos médicos.



Caso a embalagem esteja fria, a mesma pode ser aquecida em forno micro-ondas por até 20 segundos.



Para um banho de leito completo recomendamos o uso, de no mínimo, 9 lencos.

Advertências e Recomendações

- Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada;
- O produto tem como finalidade banho de leito a seco do paciente;
- Produto sem enxágue;
- Não aplicar nas pálpebras, nos cantos externos do nariz e da boca e na pele irritada ou lesionada;
- Evitar exposição solar durante o uso do produto;
- Nas primeiras aplicações poderão ser observadas sensações transitórias de ardor, pinicação ou ressecamento da pele.
 Persistindo o incômodo, suspenda o uso do produto e procure orientação médica;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Não ingerir;
- Em caso de contato acidental com os olhos, lavar com água em abundância. Havendo irritação, suspenda o uso e procure por orientação médica;
- Proibido reutilizar;
- Em pacientes lactantes ou gestantes este produto deve ser utilizado sob autorização e supervisão médica;
- Não é necessário utilizar outros produtos de higienização antes ou após a utilização do Med Cover Barrier Cream Cloths;
- Produto livre de látex:
- Armazenar em local seco e limpo.

Instruções para Uso no Micro-ondas:

- Coloque o produto no forno micro-ondas;
- 2. Mantenha por no máximo 20 segundos a 700W;
- 3. Verifique a temperatura do produto;
- 4. Não use em temperaturas maiores que 35-40°C.

Armazenamento

Armazenar o produto em local fresco e seco, longe de luz solar direta.



Fabricado por: YASIR TEKER MEDOFFICE TIBBI MALZAME TEKSIL KIMYA IHRACAT SANAYI VE TICARET - Turquia. Importado, distribuído e embalado por: Cath-Care Indústria Importação e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. CNPJ: 27.055.841.0001-52. Endereço: Rua Projetada, nº 04, 280 - Cd Ind2 Barras. Limeira (São Paulo-SP)

Responsável Técnico: Juliana de Paula Roque CRF/SP 65599. Atendimento ao consumidor: +55 19 3400.7000.

www.cathcare.com.br

Processo ANVISA: 25351.810728/2020-45

Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.