

MED-COVER WASH GLOVES WITH BARRIER CREAM



Luvas para higiene íntima

Referência: 810.820.069

Med-Cover Wash Gloves with Barrier Cream são luvas para higiene íntima, que possuem em sua composição dimeticone 3% e outras substâncias que higienizam, protegem e proporcionam maior conforto ao paciente. Sua formulação é dermatologicamente testada. Pode ser aquecida, para proporcionar maior conforto ao paciente. Descartável e de uso único.

Informações do Produto

Camada	Material
Interna	85GSM 30% Viscose + 70% Polietileno
Externa	85GSM 30% Viscose + 70% Polietileno

Tamanho	Peso Unitário	pH
17cm x 23.5cm	0,30 gramas	5.5

Composição




Aqua, Parfum, Panthenol, Glycerin, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Aloe Barbadensis Extract, Chamomilla Recutita Extract, Chlorhexidine Digluconate, Dimethicone, Polysorbate 20, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Lauryl Glucoside, Citric Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Instruções de Uso




Abra o pacote e retire a quantidade de luvas necessárias para a higienização do paciente.

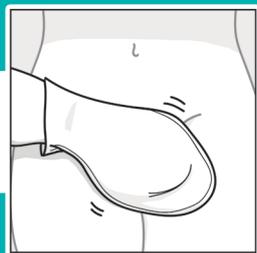

Aplique suavemente na região íntima do paciente. Usar uma luva separadamente.



Descarte o produto de acordo com os regulamentos de descarte de produtos médicos.

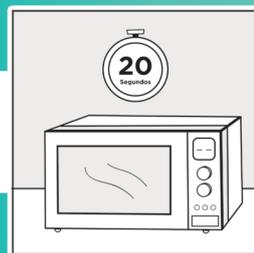

Caso a embalagem esteja fria, a mesma pode ser aquecida em forno micro-ondas por até 20 segundos.



Para uma higiene completa recomendamos o uso de, no mínimo, 3 luvas.

Advertências e Precauções

- Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada;
- O produto tem como finalidade higiene íntima do paciente;
- Aplicar somente nos órgãos genitais externos;
- O excesso de uso do produto pode ser uma fonte de irritação genital;
- Produto sem enxágue;
- Não aplicar nas pálpebras, nos cantos externos do nariz e da boca e na pele irritada ou lesionada;
- Evitar exposição solar durante o uso do produto;
- Nas primeiras aplicações poderão ser observadas sensações transitórias de ardor, pinicação ou ressecamento da pele. Persistindo o incômodo, suspenda o uso do produto e procure orientação médica;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Não ingerir;
- Em caso de contato acidental com os olhos, lavar com água em abundância. Havendo irritação, suspenda o uso e procure por orientação médica;
- Proibido reutilizar;
- Em pacientes lactentes ou gestantes, este produto deve ser utilizado sob autorização e supervisão médica;
- Não é necessário utilizar outros produtos de higienização antes ou após a utilização do Med Cover Wash Gloves with Barrier Cream;
- Produto livre de látex;
- Armazenar em local seco e limpo.

Instruções para Uso no Micro-ondas:

1. Coloque o produto no forno micro-ondas;
2. Mantenha por no máximo 20 segundos a 700W;
3. Verifique a temperatura do produto;
4. Não use em temperaturas maiores que 35-40°C.

Armazenamento

Armazenar o produto em local fresco e seco, longe de luz solar direta.