


 **FirstCare**
Making The Essential Simple

INSTRUÇÕES DE USO PARA BANDAGEM DE EMERGÊNCIA GUIA DE BOLSO

- Uso único e pessoal. Risco de infecção em caso de reutilização.
- Descartar conforme os protocolos vigentes de descarte para produtos contaminados e médicos.

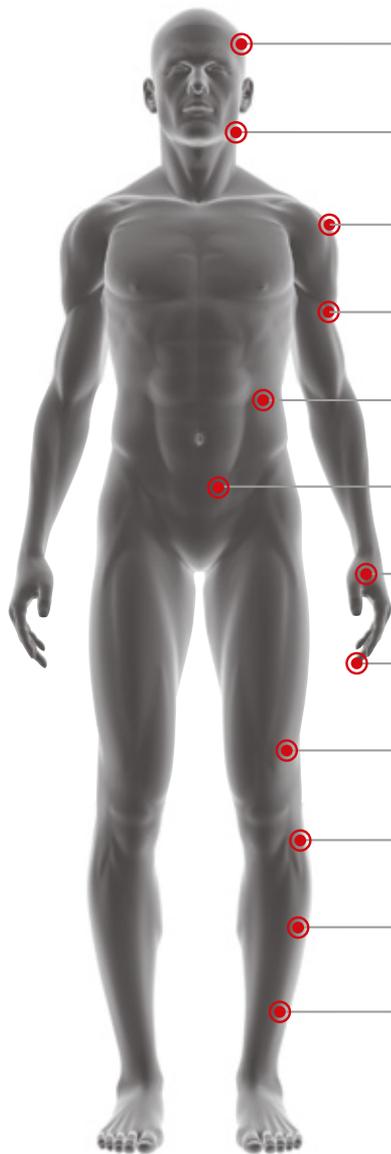

Curativo de ferimento na **CABEÇA** >

Curativo de ferimento no **PESCOÇO** >

Curativo e imobilização no **BRAÇO** >

Curativo de ferimento para **BRAÇO** >

Curativo de entrada e saída na **CINTURA** >

Curativo para ferimento **ABDOMINAL** >

Curativo de amputação de **MÃO** >

Curativo de auto aplicação para **MÃO/BRAÇO** >


Curativo de abrasão na **PERNA** >

Curativo oclusivo para ferimento na **PERNA** >

Curativo de amputação de **PERNA** >

Curativo para ferimento na **PERNA** >

CURATIVO DE FERIMENTO NA CABEÇA

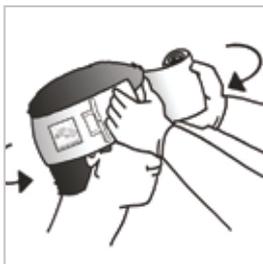

01.

Coloque o curativo na ferida e enrole a bandagem elástica envolvendo a cabeça.



04.

Cubra o queixo para maior controle e estabilidade, e continue envolvendo a bandagem.



02.

Encaixe a bandagem no aplicador de pressão e envolva a cabeça. Puxe para trás, forçando o aplicador de pressão para baixo.



05.

Então, prenda as extremidades do fecho na bandagem.



03.

Encaixe a ponta da bandagem atrás de um dos cantos do aplicador de pressão para virar a direção enfaixamento.

CURATIVO DE FERIMENTO NO PESCOÇO



01.

Levante o braço do paciente, oposto ao lado da ferida, acima de sua cabeça.



02.

Enrole a ponta da bandagem ao redor do corpo e na axila oposta ao ferimento.



03.

Encaixe a bandagem no aplicador de pressão, aperte e puxe para trás.



04.

Enrole firmemente a bandagem sobre o aplicador de pressão fixando as extremidades. Prenda as pontas da bandagem e abaixe o braço do paciente para que a pressão e a distância sejam maiores.

IMOBILIZAÇÃO E CURATIVO PARA FERIMENTOS NO BRAÇO




01.

Centralize o curativo na ferida.



04.

Enrole firmemente a bandagem sobre o aplicador de pressão, envolvendo todas as bordas do curativo.

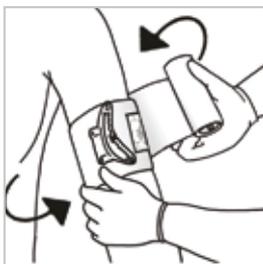

02.

Enrole a bandagem elástica em volta do membro.



05.

Use o pedaço restante da bandagem para imobilizar o braço contra o corpo, envolvendo a parte de trás do corpo por baixo da axila oposta, retornando ao redor do braço ferido.



03.


Encaixe a bandagem no aplicador de pressão. Enrole e puxe novamente, forçando a pressão para baixo.



06.

Prenda as pontas das barras de fechamento na bandagem elástica.

CURATIVO PARA FERIMENTOS NO BRAÇO

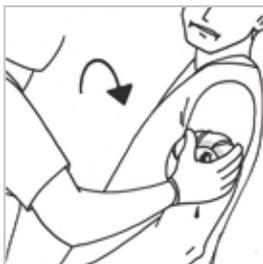

01.

Posicione a rosca em torno do ferimento protuberante.



02.

Enrole a bandagem elástica em volta do círculo da rosca para fixar e firmar em volta do ferimento.



03.

Insira a bandagem elástica no aplicador de pressão e mude a direção para continuar envolvendo.




04.

A. Continue envolvendo a bandagem sobre o círculo interno da rosca.


B. Encaixar as barras de fechamento nas camadas anteriores a guia de envolvimento.

CURATIVO DE ENTRADA E SAÍDA

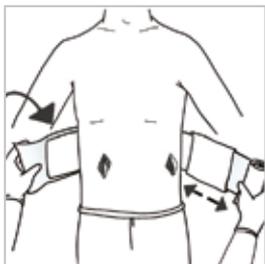


01.

Enrole a bandagem elástica em torno do membro ou parte do corpo colocando o curativo no ferimento, com o curativo tendo o aplicador de pressão posicionado acima da ferida com maior sangramento.

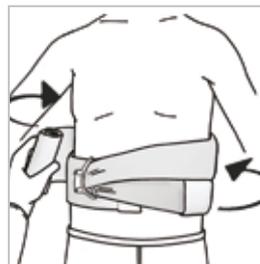


04.

...puxe para trás forçando o aplicador de pressão para baixo do curativo.

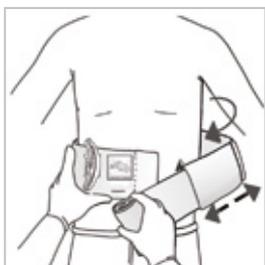


02.

Insira a bandagem elástica no aplicador de pressão.

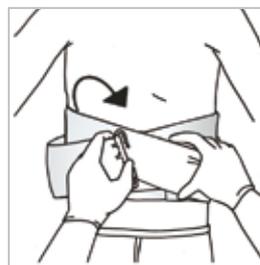


05.

Enrole a bandagem elástica firmemente sobre o aplicador de pressão. Envolver todas as bordas do curativo.

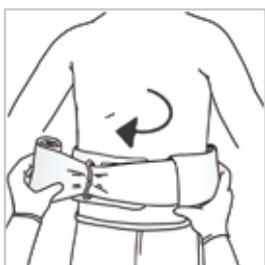

03.


Aperte a bandagem elástica e...

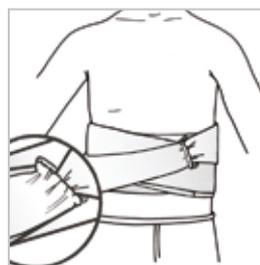

06.


Prenda as pontas da barra de fechamento na bandagem elástica.

CURATIVO PARA FERIMENTO ABDOMINAL

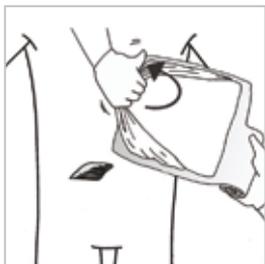


01.

Remova a barreira plástica caso não precise.

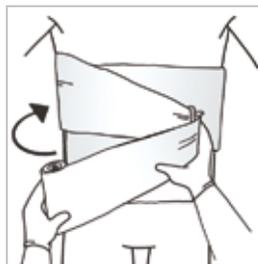


04.

Inverta a direção da bandagem e a envolva para cobrir a metade inferior do curativo.

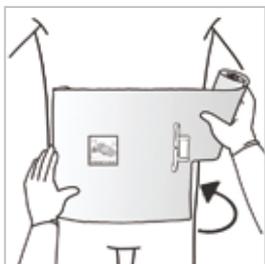


02.

Coloque o curativo na área do ferimento (não pressiona para baixo).

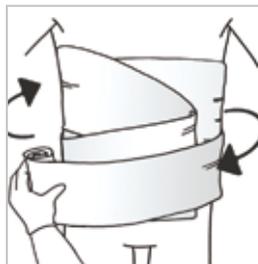

05.

A. Prossiga para envolver o tronco.
B. Certifique-se de cobrir todas as bordas do curativo.

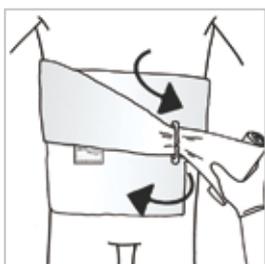

03.


A. Enrole a bandagem ao redor do tronco e traga para frente do corpo (não aperte).
B. Enrole a bandagem elástica para cobrir a metade superior do curativo, e insira no aplicador de pressão.



06.


A. Encaixe as barras de fechamento nas camadas interiores da bandagem elástica.
B. Umedeça completamente o curativo para manter a área do ferimento úmida.

CURATIVO DE AMPUTAÇÃO DE MÃO

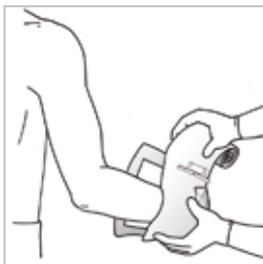


01.

Coloque o local amputado no centro do curativo.

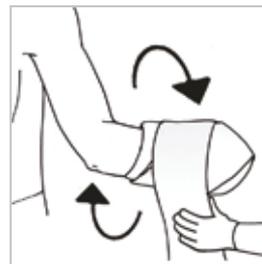

04.

Deixe de 2 à 3 voltas da bandagem elástica desembrulhadas/desenroladas.

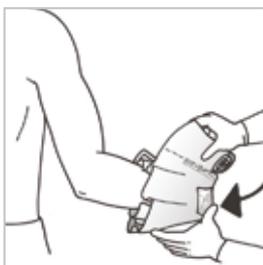


02.

Cubra o local amputado com a bandagem elástica.




05.

Torça a bandagem elástica desembrulhada e enrole na bandagem elástica previamente enrolada acima das bordas do curativo.

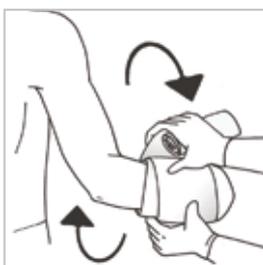

03.


Enrole firmemente a bandagem elástica cobrindo todas as bordas do curativo.

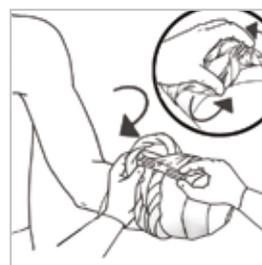

06.


Insira a barra de fechamento entre os cordões embrulhados e gire para efetuar o torniquete. Garanta o fechamento seguro com as barras de fechamento.

CURATIVO DE AUTO APLICAÇÃO PARA MÃO/BRAÇO

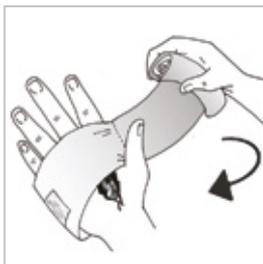


01.

Deslize a mão ferida para dentro da aba da bandagem elástica para estabilizar o curativo.

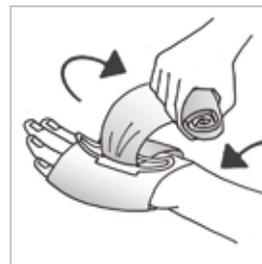


04.

Coloque a bandagem elástica dentro do aplicador de pressão. Aperte a bandagem elástica e puxe para trás, forçando o aplicador de pressão para baixo no curativo.

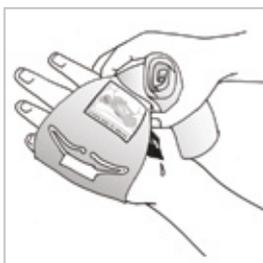


02.

Posicione-o de forma que o curativo e o aplicador de pressão permaneçam na área da ferida.

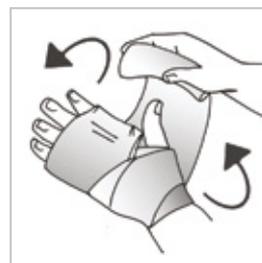


05.

Enrole a bandagem elástica firmemente em volta do aplicador de pressão.

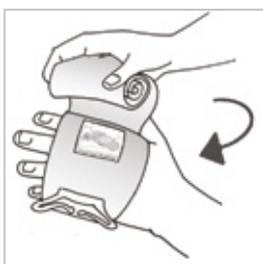

03.

Use sua outra mão para enrolar a bandagem elástica.

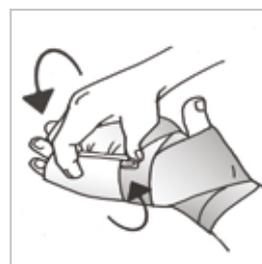

06.


Encaixe as pontas dos ganchos da barra de fechamento na bandagem elástica.

CURATIVO DE ABRASÃO PARA PERNA



01.

Remova a barreira de plástico caso não seja necessário.

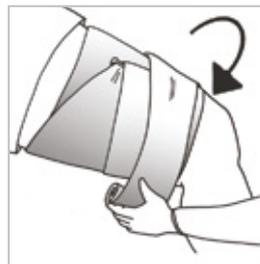

04.

Enrole a bandagem elástica para cobrir a metade inferior do curativo.




02.

Coloque o curativo no local do ferimento.



05.


A. Prossiga para envolver todo o membro.
B. Certifique-se de cobrir todas as bordas do curativo.

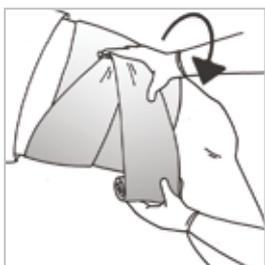

03.

A. Enrole a bandagem elástica em volta do membro.
B. Enrola a bandagem elástica para cobrir a metade superior do curativo e insira-a no aplicador de pressão para mudar a direção da bandagem.

CURATIVO DE OCLUSIVO PARA FERIMENTO NA PERNA

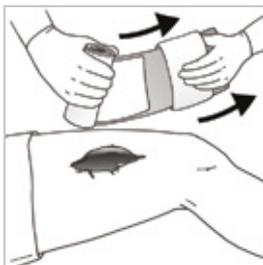


01.

Remova a segunda passagem móvel da bandagem.



04.

Posicione o curativo e o aplicador de pressão acima da ferida compactada.

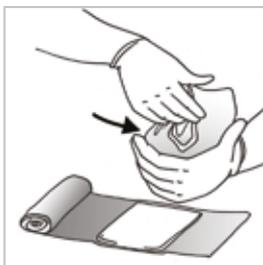

02.

Forme o curativo em forma de bola e...




05.

Insira a bandagem elástica no aplicador de pressão, aperte a bandagem e puxe-a para trás.



03.

...coloque o curativo em formato de bola dentro da ferida.

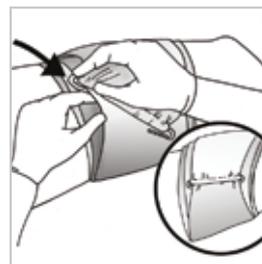

06.


Enrole a bandagem elástica firmemente sobre o aplicador de pressão. Encaixe as barras de fechamento dentro da bandagem.

CURATIVO PARA AMPUTAÇÃO DE PERNA




01.

Remova a segunda passagem móvel da bandagem.

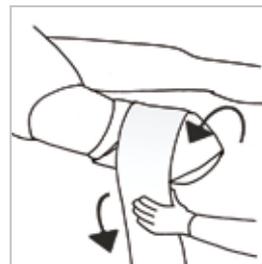


04.

Deixe 2 à 3 voltas desenroladas/desembrulhadas.

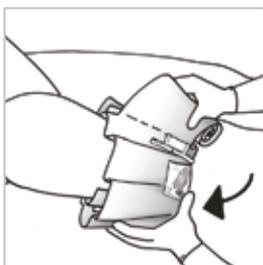


02.

A. Coloque o local amputado no centro do curativo.
B. embrulhe o local amputado com a bandagem elástica.

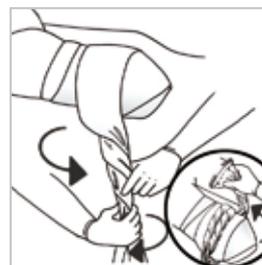


05.

Torça e enrole a bandagem elástica ao redor do membro na guia previamente enrolada acima da borda do curativo.

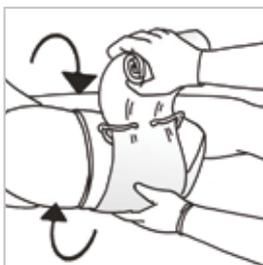

03.

Use o aplicador de pressão como uma fivela para enrolar firmemente e prender a bandagem elástica para cobrir todas as bordas do curativo.

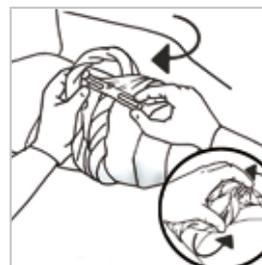

06.

Insira as barras de fechamento por dentro da bandagem elástica e gire para obter o torniquete. Certifique-se de que está seguramente preso pelas barras de segurança.

CURATIVO DE FERIMENTO NA PERNA




01.

Posicione o curativo no ferimento.



02.

Insira a bandagem elástica dentro do aplicador de pressão.

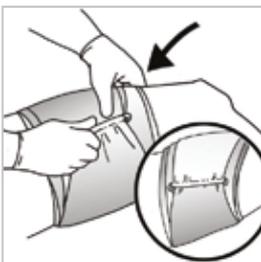

03.

Enrole a bandagem elástica firmemente sobre o aplicador de pressão. Cubra todas as partes do curativo. Certifique-se de que está seguramente preso com as barras de segurança.