


INSTRUÇÕES DE USO


APLICAÇÃO COM DUAS MÃOS

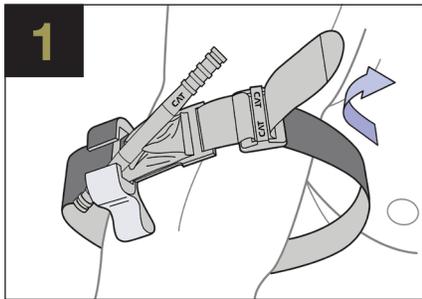


1
Direcione a tira em volta do membro, passe a lingueta através da fenda da presilha, e posicione o **CAT** 2-3" (5-7 cm) acima do local do sangramento diretamente na pele*

OU


APLICAÇÃO COM UMA MÃO

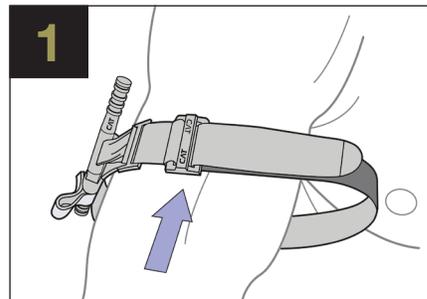


1
Insira o membro ferido através do laço feito com tira e posicione o **CAT** 2-3" (5-7 cm) acima do local do sangramento diretamente na pele*

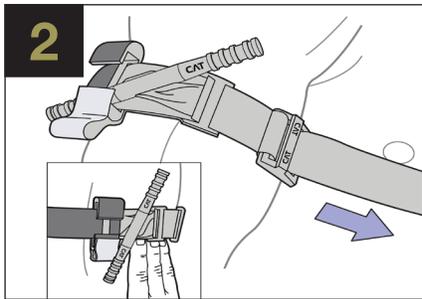


2
Puxe a tira firmemente e prenda em todo o seu caminho em volta do membro, mas não sobre os cliques. A tira deve estar presa o suficiente para que a ponta de três (3) dedos não possam deslizar entre a tira e o membro. Se as pontas de três (3) dedos deslizar sob a tira, reaperte e reafixe.

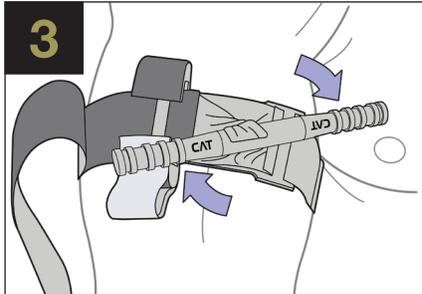

3
Gire a haste até parar o sangramento.

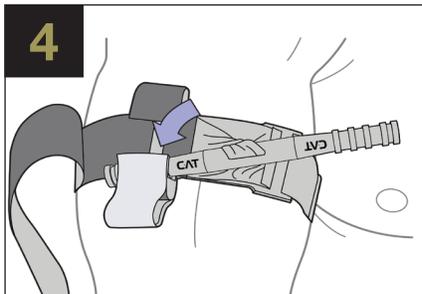

4
Fixe a haste dentro do clipe para prendê-la no local. Verifique se há sangramentos e pulso distal. Se o sangramento não está controlado, ou o pulso distal estiver presente, considere aperto adicional ou aplicar um segundo **CAT** acima e lado a lado ao primeiro.
Reavalie.

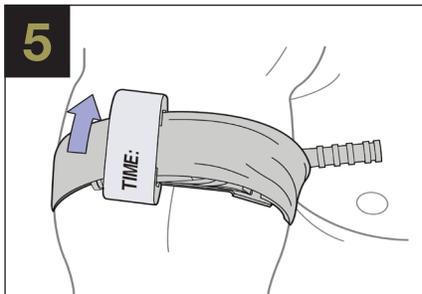


5
Direcione a tira entre os cliques e sobre a haste. Fixe a haste e a tira com a fita TIME. Escreva o tempo de aplicação.

*Se você não está seguro ou não for possível dedicar tempo adicional para examinar de onde o sangramento provém baseado na situação, o **CAT** pode efetivamente ser aplicado sobre a roupa o mais alto possível no braço ou na perna. O **CAT** NÃO pode ser aplicado sobre objetos sólidos dentro nas roupas ou bolsos. Assim que a situação permita, o membro ferido deve ser avaliado e o **CAT** reposicionado 2-3" (5-7 cm) acima do ferimento diretamente sobre a pele.




TORNIQUETE


ARMAZENANDO DO CAT NA CONFIGURAÇÃO DE INICIALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RÁPIDA

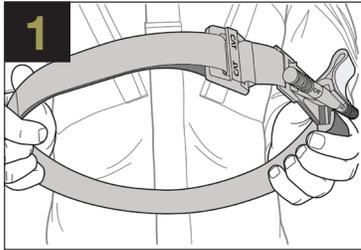

1
Passe a tira através da fenda da fivela. Puxe a tira umas 8" (20 cm) e dobre-a de volta aderindo-a a si mesmo.

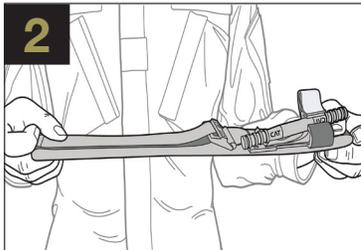

2
Achate o loop formado pela tira. Coloque a fivela no no meio da tira dobrada.

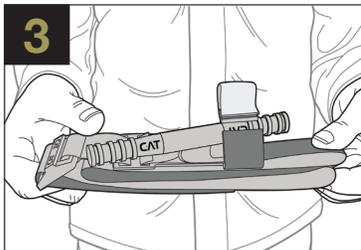

3
Dobre o CAT pela metade colocando a fivela em uma extremidade. O Torniquete está agora pronto para ser colocado no seu Kit médico.

O CAT está pronto para ser colocado no seu KIT.

INSTRUÇÕES DE USO PADRÃO:

O uso pretendido do aplicativo de combate Tourniquet® (CAT) é para obstruir o fluxo sanguíneo de uma extremidade no caso de uma ferida traumática com hemorragia significativa. O benefício clínico do CAT é o controle de um sangramento com risco de vida que resulta em menos perda de sangue. O usuário pretendido do CAT só deve ser usado conforme orientado pelas diretrizes do componente de serviço militar do usuário, autoridade EMS ou sob a supervisão de um médico e em estrita conformidade com estas instruções de uso. A população-alvo para CAT é qualquer pessoa com sangramento importante nas extremidades superiores ou inferiores, o que representa risco de vida e não pode ser interrompido de outra forma. O CAT tem uma circunferência operacional máxima de 35 pol. (88,9 cm). O uso de qualquer torniquete por mais de 2 horas pode levar a danos neurológicos ou musculares permanentes. Se você não tiver certeza ou não puder dedicar um tempo adicional para examinar de onde está vindo o sangramento com base na situação, o CAT pode ser aplicado com eficácia sobre a roupa o mais alto possível no braço ou na perna. O CAT NÃO deve ser aplicado sobre objetos sólidos dentro da roupa. Assim que a situação permitir, o membro lesionado deve ser avaliado e CAT reposicionado 2"-3" (5-7cm) acima da lesão diretamente na pele. O CAT deve ser armazenado em local fresco e seco, longe da luz solar direta. A reutilização deste dispositivo descartável pode apresentar risco de infecção. Elimine os usados CAT de acordo com os regulamentos locais para resíduos biomédicos. Comunique todos os incidentes graves relacionados com CAT ao fabricante e à autoridade reguladora apropriada.



INST-025 REV03 2021-07-28



Distribuição por:
PerSys Medical ent
www.persysmedical.com
1.888.737.7978 | 713.723.6000
5310 Elm St. Houston, TX 77081



TACTICAL PRETO
NSN 6515-01-521-7976



TREINAMENTO AZUL
NSN 6910-01-560-2972



EMS LARANJA
NSN 6515-01-612-7129

LOT Número de lote	Consulte as instruções de uso
Fabricante	EC REP Representante autorizado na Comunidade Europeia / União Europeia
Manter seco	Afaste-se da luz solar
MD Aparelho médico	UDI Identificador Único de Dispositivo
Não reutilize	

<p>Combat Application Tourniquet® and CAT are trademarks registered in the United States and certain other countries.</p>	
<p>U.S. Patent Nos. 7,842,067; 7,892,253; 8,888,807; 10,016,203; Canada Patent No. 2,569,550; EU Patent Nos. 1,753,344; 2,425,786; Israel Patent No. 179769; Hong Kong Patent No. 1,163,479; Other Patents Pending</p>	<p>Manufactured by C-A-T Resources, LLC 483 Lakeshore Pkwy, Rock Hill, SC 29730 United States of America 803.325.9300</p>