


NECKLITE

COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA - ADULTO

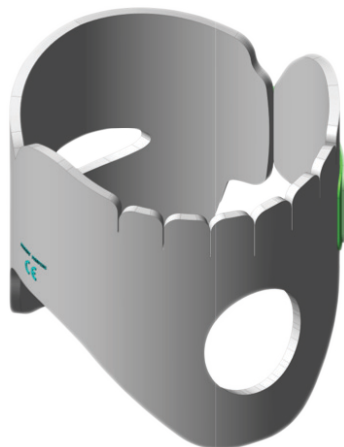

- Imobilização cervical para remoção e reabilitação
- Ajuda a reduzir o movimento lateral
- Flexão e extensão anterior-posterior

PRECAUÇÕES

É importante que os profissionais sejam treinados e tenham praticado o uso e aplicação do dispositivo. Instruções devem ser consideradas como diretrizes, e não como uma tentativa de definir a prática médica. Use o dispositivo apenas após revisão e aprovação pela autoridade médica supervisora.



Distribuído por: PerSys Medical


Fabricante: FLAMOR s.r.l. • Via Biandrate, 80, 28060 San Pietro Mosezzo (NO), Itália
Tel: +39.0321.442441 • Fax: +39.0321.392190 • info@flamor.com • www.flamor.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES


Leia atentamente todas as instruções antes de usar. Siga sempre os protocolos estabelecidos para uso aprovado e aplicação de dimensionamento. Mantenha a cabeça do paciente em alinhamento neutro com o tronco, exceto se contraindicado. Evite movimentos laterais, bem como flexão e extensão anterior-posterior.

INSTRUÇÕES DE USO


Estabilize manualmente a cabeça e o pescoço do paciente em posição neutra durante cada etapa do processo. Posicione o colar de maneira que os gráficos e o texto fiquem do lado externo. Este lado deve ser visível após a aplicação.

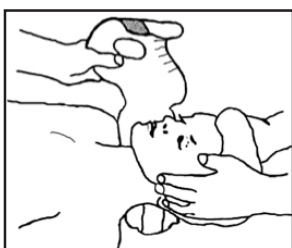

1 Deslize a parte de trás do colar, com o buraco elíptico, para a parte de trás do pescoço do paciente. Passe por baixo do paciente até que possa alcançá-lo no lado oposto.

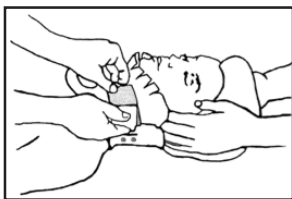

2 Envolver o lado da frente em torno da mandíbula inferior, alinhando o buraco oval sob o queixo. Prenda o colar firmemente em volta do pescoço do paciente usando a tira de velcro. O colar deve repousar em cima do ombro do paciente e contra o esterno, sem aberturas visíveis.

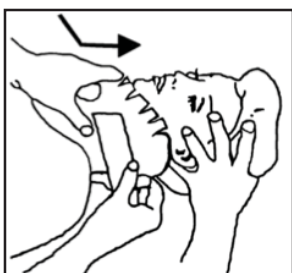

3 Empurre as pequenas asas contra o queixo e certifique-se de que estão em uma posição de suporte. Ajuste o colar para uma posição que imobilize o pescoço do paciente. Se necessário, reajuste a tira de velcro.